


Sistema di posizionamento Trendelenburg WaffleGrip (A 300)

accessorio di riscaldamento del paziente HotDog®

ISTRUZIONI PER L'USO

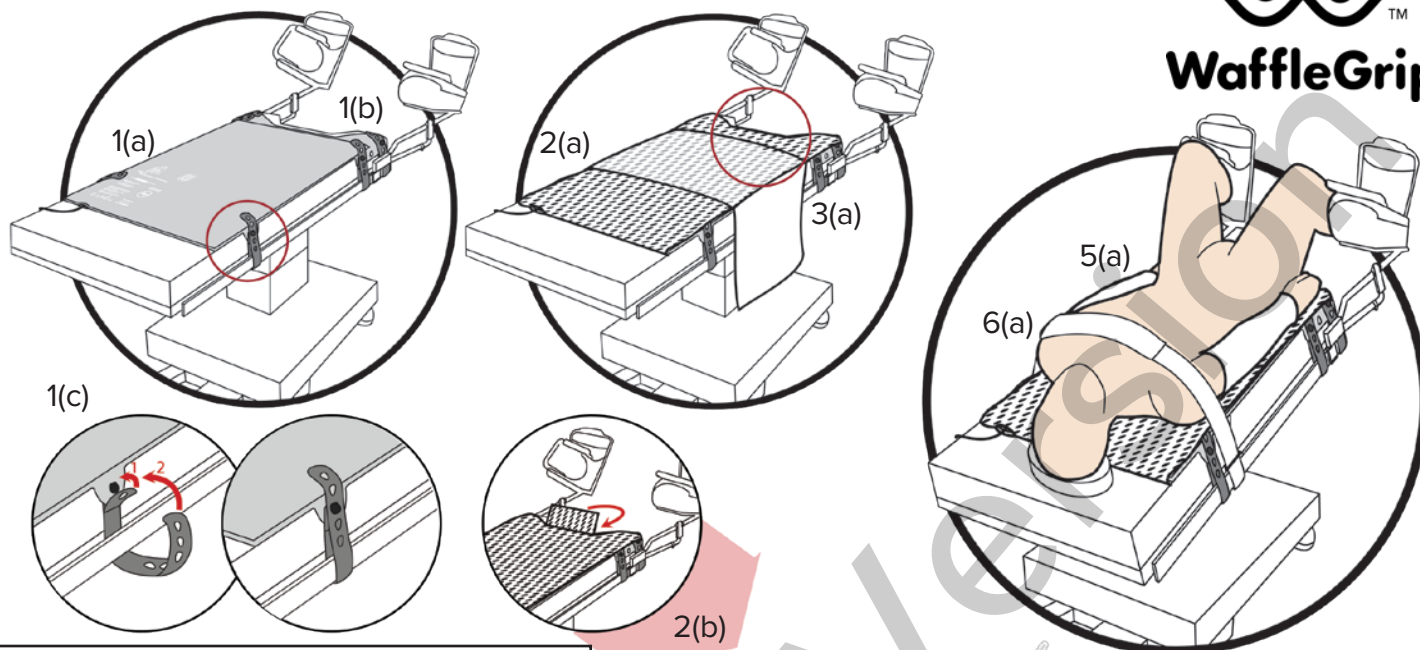

A300 Contenuto della confezione:

- (1) WaffleGrip tappetino
- (1) Foglio sagomato (per il sollevamento del paziente e il rimbocco del braccio)
- (1) Cinturino di sicurezza

- (2) Morsetti metallici (per posizionamento e tenuta della coperta di riscaldamento HotDog) Il kit non include: Materasso riscaldante U300
- (6) Cinghie di fissaggio della guida laterale

Materasso riscaldante HotDog U300
Materasso per tavolo operatorio
Tavolo operatorio

Sezione trasversale

Patta di plastica rinforzata: infilata tra il materasso riscaldante HotDog e il materasso per tavolo operatorio

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Collocare il materasso di riscaldamento del paziente HotDog U300 sul tavolo operatorio con sensore e cavo verso l'estremità della testina (a). Allineare la sagoma perineale sul materasso riscaldante con quella del tavolo operatorio (b). Collegare il materasso alle sponde laterali utilizzando 6 cinghie come mostrato (c).

2. Posizionare WaffleGrip antiscivolo sul materasso riscaldante HotDog come mostrato nell'etichetta e dispiegarlo. Inserire il cavo del materasso attraverso l'obolo (a). Allineare le linee piegate sigillate su WaffleGrip con le estremità del materasso riscaldante, con aletta in plastica rinforzata sul ritaglio perineale.

IMPORTANTE – LA PATTA DI PLASTICA RINFORZATO DA RIMBOCCARE TRA MATERASSO RISCALDANTE E MATERASSO DA TAVOLO OPERATIVO [VEDI SEZIONE TRASVERSALE (b)]. Il lembo non deve essere visibile o appeso nella sagoma perineale. Riporre il cuscinetto WaffleGrip rimanente (oltre le linee di piegatura) sotto il materasso riscaldante.

3. Posizionare il foglio non tessuto trasversalmente sul tavolo come mostrato, con WaffleGrip in direzione del paziente (a).
4. Collegare il materasso per il riscaldamento del paziente HotDog al controller HotDog WC52 utilizzando il cavo blu A112. Seleziona la temperatura Vedere Istruzioni per l'uso del materasso per riscaldamento paziente HotDog (PN 2064) e dell' Unità di Controllo (PN 2135).
5. **IMPORTANTE** - IL PAZIENTE DEVE ESSERE A CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE CON WAFFLEGrip per evitare che scivoli dal Trendelenburg. Posizionare il paziente utilizzando il foglio sagomato. Allineare i glutei del paziente sull'estremità rimboccare di WaffleGrip. Posizionare le braccia come mostrato o secondo il protocollo di posizionamento ospedaliero (a).
6. Fissare la cinghia di sicurezza sulla parte superiore del torace del paziente avvolgendo le cinghie sotto le guide laterali e inserendo i supporti metallici su ciascun lato. Fissare le cinghie sul torace del paziente (a). La cinghia può essere utilizzata per sostenere la coperta riscaldante HotDog.
7. Consultare le istruzioni separate per un posizionamento più efficace della coperta di riscaldamento del paziente HotDog durante i casi di utilizzo del Trendelenburg.

UTILIZZARE SOLO COME INDICATO

ATTENZIONE: i segni sulla cute lasciati dal tappeto si dissiperanno poco dopo la procedura.

IMPORTANTE:

1. Non utilizzare lubrificanti, oli o polveri sulla pelle del paziente a contatto con WaffleGrip. Pulire la pelle con alcool in caso di presenza degli stessi. (Una riduzione dell'attrito ridurrà la capacità antiscivolo del materassino)
2. Non progettato per l'uso nell'inversione di Trendelenburg.

PN 2793IT (9-26-2019)



AUGUSTINE
TEMPERATURE MANAGEMENT
patient safety is our passion



Augustine Temperature Management, LLC
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.hotdogwarming.com Ph: 952-465-3500

